

MANUEL UTILISATEUR DISO

Table of Contents

I. Introduction	1
II. Interpréter un test rapide avec le DISO.....	1
1. Prérequis	1
2. Étape 1	1
3. Étape 2	2
4. Étape 3	2
5. Étape 4	2
6. Étape 5	2
7. Recommandations d'usage importantes ⚠	2
8. Description technique de l'appareil :	2

I. Introduction

Le DISO est un appareil de diagnostic in vitro qui permet d'automatiser la numérisation, la lecture et l'interprétation des tests rapides.

Directement lié à votre compte Peseshet, vous pouvez réaliser tous types de tests rapides*

*Dans la limite des tailles permettant l'insertion du test dans le tiroir (8,5x6cm) du DISO.

II. Interpréter un test rapide avec le DISO

1. Prérequis

Pour pouvoir interpréter un test à l'aide du DISO, il faut préalablement avoir enregistré le test sur Peseshet mobile en suivant les instructions décrites sur notre page « [réaliser un test rapide](#) ». Une fois enregistré, voici comment procéder :

2. Étape 1

Allumez le DISO et munissez-vous de votre téléphone connecté à Peseshet. Un QR code apparaît sur l'écran, il faut alors le scanner avec Peseshet pour vous authentifier. Une fois connecté, deux catégories de cassettes apparaissent : celles qui sont en cours et celles déjà interprétées.

3. Étape 2

Ouvrez le tiroir du DISO, placez la cassette à l'intérieur et refermez. Il faut être vigilant de placer la cassette dans le bon sens, comme indiqué sur l'écran. Le DISO identifie automatiquement la cassette insérée grâce à la lecture du QR code collé préalablement dessus.

4. Étape 3

Vérifiez que la photo prise par le DISO est lisible. Si tout est bon, cliquez sur « interpréter », sinon, recommencer.

5. Étape 4

Réalisez la lecture du test en indiquant si la ligne de contrôle et la ligne de test sont présentes ou absentes. Si le test est multiple, vous devez renseigner ces informations pour chaque biomarqueur testé en cliquant sur la flèche violette.

6. Étape 5

Si vous avez l'autorisation nécessaire, validez la conclusion. Sinon attendez que la personne habilitée valide le résultat. Si vous souhaitez éditer l'interprétation, rendez-vous sur Peseshet mobile pour ajouter un commentaire.

Voilà, vous avez terminé l'interprétation d'un test.

7. Recommandations d'usage importantes ⚠

Veillez à toujours recharger le DISO uniquement avec l'alimentation fournie (MEAN WELL EU YP22 YC12).

Usage interne uniquement, ne pas utiliser l'appareil dans un environnement en dehors de la plage de température de 15 à 35°C.

8. Description technique de l'appareil :



